

Varningar



FÖR INTE in pipetten djupt i hörselgången och tryck den inte tätt mot öronöppningen, eftersom detta kan skapa tryck i örat.



SPOLA INTE örat med kall lösning. Värm vätskan tills den är nära kroppstemperatur.



FORTSÄTT INTE behandlingen om du eller ditt barn upplever smärta eller obehag.

När behandlingen ska avbrytas

Avbryt behandlingen omedelbart om du eller ditt barn upplever smärta, yrsel, feber eller svullnad i den yttre hörselgången. Kontakta vårdpersonal om det fortfarande rinner vätska eller var från örat efter 7 dagar.

Försiktighetsåtgärder

Barn

Vårdpersonalen ska följa instruktionerna noggrant. Öronspolning på barn bör vid utebliven förbättring helst utföras på läkarmottagning eller vårdcentral.

Användare av hörapparat

Sätt inte in hörapparaten förrän öronspolningen är avslutad och örat är torrt.

Koordinationssvårigheter

Om du har koordinationssvårigheter, be någon annan om hjälp.

Möjliga biverkningar

Obehag i hörselgången, hudirritation och tillfällig yrsel kan förekomma.

Regulatorisk information



Denna produkt är en medicinteknisk produkt och uppfyller kraven i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter.

EarClean (10 pcs) UDI-DI: 07350186950013

EarClean (5 pcs) UDI-DI: 07350186950006



Tillverkningsdatum



Utgångsdatum



Skyddas mot solljus



Varningar



1001



1002



Batchnummer



Återanvänd ej

Ungefärlig fyllnadsvolym: 10 ml


Kontaktinformation

ReiBeck Innovation AB
Nummerjordsgränd 6C
SE-239 32 Skanör
Sverige

E-post: akereimer@gmail.com

Alla allvarliga incidenter som involverar produkten ska rapporteras till tillverkaren eller till relevant myndighet i användarens medlemsstat. Funktionsfel ska rapporteras till tillverkaren.

EAR CLEAN® BELLOW PIPETTE

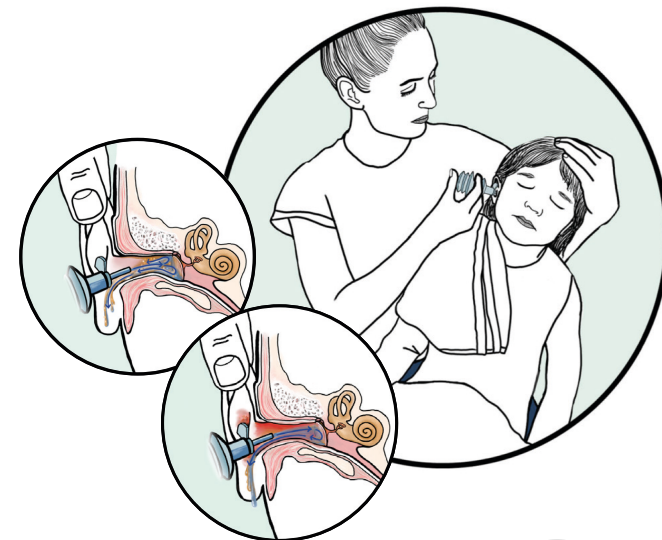

Bruksanvisning

Utfärdandedatum: 2026-04-02

EarClean används för att tillföra sköljvätska till den yttre hörselgången på ett säkert, skonsamt och kontrollerat sätt. Under eller efter sköljningen kan vätska, öronvax och sekret avlägsnas med hjälp av sug, utan att skada örat eller orsaka onödigt obehag för användaren.

Avsedd användning

EarClean är en pipett för engångsbruk, avsedd för skonsam rengöring och sköljning av hörselgången. EarClean fungerar genom att avlägsna sekret med hjälp av sug och därefter skölja hörselgången med vätska. Produkten är utformad för att stödja hantering av öroninfektioner som är förenade med flytning från örat.

Medicinska indikationer

- Sköljning av hörselgången.
- Rengöring av hörselgången i ett friskt öra.
- Rengöring av hörselgången vid infektion, såsom extern otit.

Patientpopulation

- Friska vuxna och barn från 1 års ålder för skonsam rengöring.
- Vuxna och barn från 1 års ålder med öroninfektioner, såsom extern otit.

Avsedda användare

Vuxna, hälso- och sjukvårdspersonal, föräldrar eller vårdnadshavare till barn.

Avsedd användningsmiljö

I hemmet eller inom hälso- och sjukvården.

Kontraindikationer

Om du misstänker att det finns ett hål på trumhinnan ska du inte använda EarClean. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

Dok.ID: PO1-8.1-EN Rev: 1 Språk – engelska 2(3)



Bruksanvisning

Steg 1: Förbered användning

- Du behöver en lösning för att skölja örat samt en skål eller pappersnäsduk att hålla under örat.
- Tvätta händerna med tvål och vatten.
- Välj en ren och väl upplyst plats.
- Montera bälgen och munstycket.

Steg 2: Sug ut vätska eller sekret

- Kläm försiktigt ihop produkten och placera spetsen vid öppningen till hörselgången.
- Släpp långsamt pipetten för att suga ut sekretet.
- Töm sekretet i en pappersnäsduk, duk eller skål.
- Upprepa sugningen några gånger vid behov.

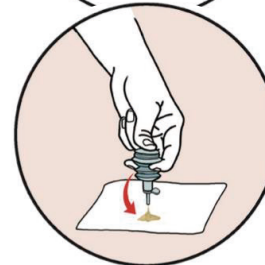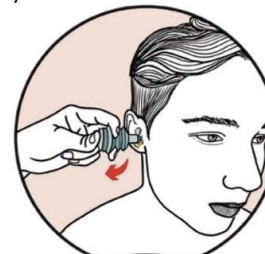

Steg 3: Skölj örat med lösningen

- Fyll pipetten med handvärm eller ljummen lösning: kläm ihop bälgen och placera spetsen i lösningen, släpp sedan för att fylla pipetten.
- Placera försiktigt pipetten precis innanför öronöppningen. Tryck inte in den djupt.
- Kläm jämnt för att skölja örat med lösningen.
- Låt vätskan rinna ut naturligt.
- Upprepa vid behov.



Steg 4: Kassera produkten

- Släng pipetten efter användning – återanvänd den inte.
- EarClean sorteras som plast.
- Återanvändning kan orsaka återinfektion.

Avfallshantering

Efter användning ska produkten kasseras som plastavfall i enlighet med lokala föreskrifter.



Använd EarClean endast för ett öra.
Risk för återinfektion.